

IALUXID_{GEL}

Indications : Appliqué sur une blessure cutanée, le produit forme un film protecteur contre les agents extérieurs et prévient les infections bactériennes. Grâce à son action sur le micro-environnement cutané de la peau blessée, IALUXID GEL peut être utilisé en cas de lésion acnéique, de folliculite, de périonyxis, d'impétigo et de molluscum contagiosum.

Mode d'emploi : Se laver soigneusement les mains et nettoyer la peau avant toute application du produit. Appliquer une couche uniforme et suffisamment importante sur les lésions de manière à les recouvrir. Si besoin, appliquer le produit plusieurs fois par jour.

Ingrédients : aqua, hydrogen peroxide, carbomer, xanthan gum, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, squalane, glycine, sodium hyaluronate, polysorbate 60, oxyquinoline sulfate.

À usage topique externe uniquement. Éviter tout contact avec les yeux.

Contre-indications, précautions et mises en garde : Ne pas utiliser IALUXID GEL en cas d'allergie avérée à l'un des ingrédients. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et immédiatement à l'eau froide. Ne pas appliquer sur des points de suture.

Tenir hors de portée des enfants. Conserver entre 5°C et 25°C, à l'abri de toute source de chaleur directe.

Refermer le tube après utilisation. La durée de conservation est indiquée pour un produit non utilisé et conservé dans les conditions recommandées.

Effets secondaires : Le produit est bien toléré, mais il peut entraîner de légères rougeurs et sensations de brûlure minime juste après l'application. En cas de plaies infectées, demander à votre médecin si un traitement antibiotique local ou systémique est nécessaire.

En cas d'effets secondaires, contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Dispositif médical conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.

Date d'apposition du marquage : Mars 2015


Code ACL : 3401060176846

CE 0476



BMG Pharma S.r.l., Via F. Confalonieri 29, 20124 Milan, Italy.



Distributeur France :  **Horus**
PHARMA

148 Avenue G. Guynemer - Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - www.horus-pharma.com

5°C - 25°C

A conserver entre 5 et 25°C



A utiliser jusqu'au

LOT Numéro de lot



Fabricant



Consulter la notice



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



A utiliser dans les 2 mois après ouverture



Pensez au tri



Marquage CE délivré par l'Organisme Notifié 0476



Responsabilité des entreprises qui financent le dispositif de collecte, le tri, et le recyclage

C/IAL004-04/16