



## LUBRIFIANT OCULAIRE

### Notice d'emploi

VISMED® MULTI  
Hyaluronate de sodium obtenu par fermentation 0,18 %.  
**Lubrifiant oculaire.**  
Stérile, sans agent conservateur.

### Composition:

1 ml de solution contient 1,8 mg de hyaluronate de sodium, du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique, du citrate de sodium, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium et de l'eau purifiée. La solution est hypotonique.

### Indications:

Sensations modérées et sévères de la sécheresse oculaire.

### Contre-indications:

Hypersensibilité à l'un des constituants du produit.

### Interactions:

Ne pas administrer VISMED® MULTI en même temps que d'autres médicaments ou produits ophtalmiques car il peut en modifier les effets.

### Effets indésirables:

Dans de très rares cas, des troubles passagers tels qu'une irritation de la conjonctive, une sensation de corps étranger, une rougeur ou une sensation de brûlure de l'œil ainsi qu'une vision momentanément trouble peuvent apparaître.

### Posologie et mode d'administration:

Enlever la bague d'inviolabilité avant la première administration. Ôter le capuchon protecteur. Incliner la tête

vers l'arrière et positionner l'embout du flacon au-dessus de l'œil à traiter. Tirer la paupière inférieure vers le bas avec l'index d'une main. Presser sur le corps du flacon et une goutte de VISMED® MULTI s'écoulera facilement (voir illustrations). Sauf recommandation contraire, instiller 1 à 2 gouttes de VISMED® MULTI dans l'œil aussi souvent que nécessaire. Quelques clignements des paupières assureront une répartition uniforme de la solution sur la surface oculaire en un film transparent et durable. VISMED® MULTI peut être utilisé pendant le port de lentilles de contact (rigides ou souples).

### Précautions:

Ne pas toucher l'embout du flacon ouvert et ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon. Replacer le capuchon protecteur du VISMED® MULTI après usage. Ne pas utiliser VISMED® MULTI si le flacon est endommagé. VISMED® MULTI peut être utilisé jusqu'à 6 mois après la première utilisation. Toute solution non utilisée dans les 6 mois après ouverture doit être jetée. Dans le cas contraire, la stérilité n'est plus garantie, et ceci peut être associé à un risque d'infection.

Conservé en dessous de 30 °C. Ne pas congeler. Ne pas utiliser VISMED® MULTI après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte. Si les troubles persistent pendant l'utilisation de VISMED® MULTI, consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

### Propriétés et mode d'action:

VISMED® MULTI contient du hyaluronate de sodium, un polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain. Les caractéristiques physiques particulières du hyaluronate de sodium confèrent à VISMED® MULTI ses propriétés viscoélastiques et de rétention d'eau. VISMED® MULTI forme ainsi un film stable à la surface de l'œil qui n'est que très lentement éliminé par le battement des paupières. VISMED® MULTI allie ainsi un effet prolongé à un confort maximal. En raison de sa composition particulière, VISMED® MULTI est très bien toléré. VISMED® MULTI ne contient pas d'agent conservateur.

**Présentation:** 15 ml de solution en flacon multidose.  
Dernière révision: 2018-01

### Mode d'emploi au verso.




### Distributeur :

Horus Pharma – 148 Avenue G. Guynemer  
06700 Saint-Laurent du Var – France  
Tél. : 04 93 19 54 03, [www.horus-pharma.fr](http://www.horus-pharma.fr)  
15 ml – Code ACL : 3664490000031




TRB CHEMEDICA AG  
Otto-Lilienthal-Ring 26  
85622 Feldkirchen/Munich – Allemagne




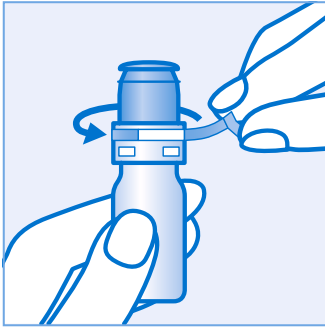


1  
Enlever la bague d'inviolabilité.

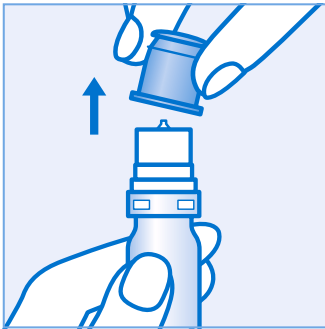

2  
Ôter le capuchon protecteur.

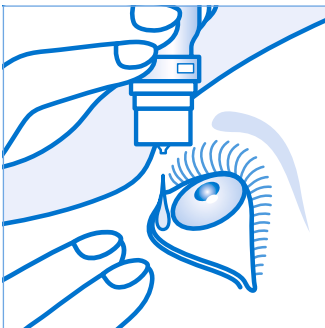

3  
Instiller une à deux gouttes dans l'œil.

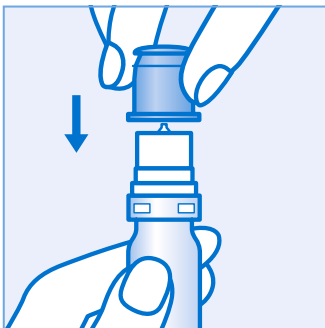

4  
Remplacer le capuchon protecteur après usage.

LOT

Numéro de lot



Date de péremption



Veuillez vous référer à  
la notice d'emploi

STERILE A



120156/1  
S/01.18  
C/VMTO17-07/17  
NOT24908V02